

# 英语 Czech

## SimplyMED<sup>+</sup>

### Dětská nosní odsávačka a vakuový čistič pórů

#### NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod  
a po použití jej dobře uschovejte.



Model: JY-922

#### ÚVOD

Zakoupený výrobek je dětská elektrická vodotěsná nosní odsávačka, která se používá k odsávání nosních sekrecí dítěte. Výrobek je vybaven 3 hlavicemi – jsou to tykvnovitá (plochá) špička a trychtýřovitá (plochá, lichoběžníková) špička pro různé věkové kategorie. Špička je ze silikonového materiálu, má měkkou texturu, je nedráždivá, bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Různé tvary špiček usnadňují absorpci sekrecí z různých částí nosní dutiny.

#### VLASTNOSTI

##### Volitelný tvar špičky

Vyberte si správnou silikonovou koncovku (špičku) podle potřeby a věku vašeho dítěte.

##### Přepínání mezi dvěma režimy

Pokud výrobek používáte jako dětskou nosní odsávačku, vyberte režim „NOSE“ s 1 úrovní. Pokud výrobek používáte pro odstraňování černých teček na obličeji, vyberte režim „FACE“ se 6 úrovněmi. Režim „FACE“ můžete také zvolit jako dětskou nosní odsávačku, a to v případě, že si myslíte, že sání je pro režim „NOSE“ nízké.

Zapněte přístroj úroveň 1 v režimu „NOSE“, po dalších 20 minutách se toto zařízení automaticky vypne.

##### Snadné čištění

Výrobek lze opláchnout vodou (ale nesmí být ponořen do vody). Sací hlavu a sběrnou nádržku lze vyjmout a čistit samostatně, přístroj tak vyčistíte důkladněji.

##### Velká kapacita, dobijecí

Vestavěná 850 mAh velkokapacitní dobijecí lithiová baterie, doplněná přenosným nabíjecím konektorem USB, může být nabíjena počítačem, powerbankou a dalšími zařízeními s rozhraním USB, snadno se přenáší.


#### SPECIFIKACE

Jméno výrobku	Dětská nosní odsávačka Vakuový čistič pórů
Model	JY-922
Dobíjecí napětí	5V/1A
Napětí baterie	3.7V
Jmenovitý výkon	3W
Kapacita baterie	850 mAh

#### ROZMÍSTĚNÍ TLAČÍTEK

#### A INSTRUKCE

- 1 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje
- 2 Tlačítko pro přepínání režimů
- 3 Tlačítko pro nastavení úrovní
- 4 Režim „NOSE“ - nos
- 5 Režim „FACE“ - obličej
- 6 Stav nabití baterie
- 7 Úroveň

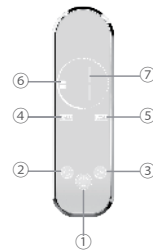

#### POKYNY PRO VYUŽITÍ

#### KONCOVEK

##### Malý hrot ve tvaru nálevky (lichoběžníkový)

Novorozencům jsou k dispozici špičky ve tvaru nálevky, které mohou být umístěny hlouběji do nosní dutiny, vhodné odstranění sekretu z hlubších částí nosní dutiny.



##### Špička ve tvaru tykve (plochá)

Pro malá miminka (dítě ve věku 3–6 měsíců) je k dispozici menší špička, která je snadno vložitelná do nosní dírký a která snadno absorbuje nosní sputum.




##### Špička ve tvaru nálevky (plochá)


Vhodná pro děti od jednoho roku a starší. Špičky ve tvaru nálevky dosáhnou hlouběji do nosní dutiny a jsou vhodnější pro odstranění hlubšího nosního výtoku.




#### JAK PŘÍSTROJ SESTAVIT

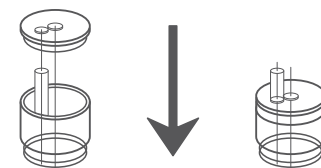

1. Nasadte kryt proti zpětnému toku na sběrnou nádržku.

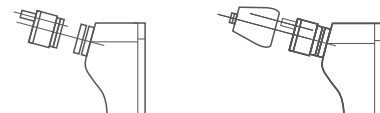

2. Namontujte sestavenou sběrnou nádržku do drážky pracovního prostoru.
3. Umístěte velkou černou sací hlavu na sestavený sběrný prostor.

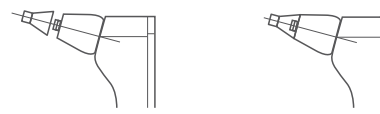

4. Nainstalujte silikonovou trysku na velkou černou PP hlavu.
5. Zkompletování přístroje.

**TIPY: Nainstalujte nosní odsávací zařízení, věnujte pozornost instalaci komponentů. Během instalace utahujte komponenty ve směru hodinových ručiček, abyste zajistili, že se díly neuvolní.**

#### POUŽITÍ

1. Nejprve sestavte pracovní část nosního odsávacího zařízení (zkontrolujte, zda je dobře upevněn těsnící gumový kroužek základny nosní čisticí kazety) a poté nainstalujte příslušnou silikonovou sací hlavu. Poté vyberte vhodnou polohu úrovně.
2. Při prvním použití přístroj nabíjejte po dobu 3 hodin, abyste prodloužili životnost baterie.
3. Před použitím elektrické nosní odsávačky pro dítě použijte hřbet ruky k otestování sací síly a nastavte ji do vhodné polohy před tím, než ji dítěti přiložíte.

##### Specifické operace:

1. Pokud jsou nosní dírký vašeho dítěte suché, musíte nejprve použít běžný fyziologický roztok ke změkčení nosní dutiny a teprve poté použít elektrickou nosní odsávačku.
2. Pokud jsou nosní dírký vašeho dítěte úzké, můžete použít elektrickou nosní odsávačku přímo.
3. Pokud, i bez sledování nosu dítěte, ztelně slyšíte zvuk „chrápání“, nos je ucpaný, doporučujeme jemně stimulovat nosní dírký dítěte, nechat dítě kýchnout ven a pak použít elektrické odsávací zařízení k vysátí.

#### ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A PÉČE

1. Před použitím se ujistěte, že součásti pracovního prostoru jsou dobře vyčištěny a nezůstala zde žádná kapalina. Ovlivňuje negativně odsávání. Vyčištěním navíc bráníte růstu bakterií.
2. Nedovoďte, aby dítě používalo výrobek samo. Před použitím otestujte sání na hřbetu ruky dospělého.

3. Při čištění a údržbě, prosím, vždy vypněte přístroj. Neponožte tělo přístroje do vody. Špička a sběrná nádržka mohou být vyjmuty a čištěny samostatně. Umyjte pracovní prostor a hlavici. Použijte bavlněný tampon, abyste pomocí malého množství lékařského alkoholu vyčistili přívod vzduchu. Po vyčištění se ujistěte, že jsou díly zcela suché a poté správně nasazené.

4. K nabíjení použijte odpovídající kabel USB, abyste zajistili, že nabíjecí napětí splňuje požadavky produktu.

5. Během používání přístroj nenabíjejte.

6. Pokud se nepoužívá po dlouhou dobu (asi tři měsíce), přístroj důkladně vyčistěte a vhodně uložte.

7. Tento výrobek nerozebírejte ani neopravujte sami. V případě oprav se obraťte na obchod, kde jste produkt zakoupili.

##### Výrobce:

Wenzhou Kaiyan Electric Co., Ltd. No. 7, Juxin Road, Juguangyuan, South Suburb Street, Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang Province, Čína

##### Dovozce:

Variopharma, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Datum poslední revize: 07/2022

##### Autorizovaný servis:

Milan Řihák, Sibiřská 89, 62100 Brno  
Tel. +420 731 155 864, e-mail: Milanrihak@seznam.cz  
Pondělí až pátek 9-17 h.

